



„Die besten Produkte für die Pflege,
stammen aus der Pflege.“

Frau Claudia Moll

Pflegebeauftragte der
Bundesregierung



**Die reduzierte Grundform
ermöglicht eine Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten!**



ALTENPFLEGE
START-UP CHALLENGE 2019
GEWINNER DER KATEGORIE HOMECARE



ALTENPFLEGE
START-UP CHALLENGE 2025
nominiert



Wir schreiben Geschichte!

Nach unserem Sieg 2019 wurden wir 2025
als erstes Unternehmen überhaupt zum
zweiten Mal für den renommierten Start-Up
Award auf Europas größter Pflegemesse
„Altenpflege“ nominiert – eine besondere
Ehre für uns!

Wir danken dem Initiator: www.vincentz.net | dem Supporter: www.hewi.com | Foto: Fachausstellung Heckmann | Fotograf: Florian Arp

Positionierung in Rückenlage

Variante 1

1 kleines + 1 mittleres majimo

Variante 2

2 kleine + 1 großes majimo

vollständige Eigenmobilisation (selbstständiges Aufsetzen)

1 großes majimo unter den Knien + optionale majimos im Oberkörper



Positionierung in Seitenlage

30° Variante 1

2 kleine + 2 mittleres + 1 großes majimo

30° Variante 2

1 kleines + 2 mittleres + 2 Druckknopf majimo

135° Variante 1

1 Druckknopf + 1 kleines + 1 mittleres + 1 großes majimo

135° Variante 2

gleiche Kissen andere Anordnung



V-A-T-I Positionierung – Fersenfreilagerung und Spitzfußprophylaxe

V-Positionierung 1

Belüftung der unteren Lungenspitzen, Venenentlastung und Bauchentspannung
3 mittlere + 1 großes majimo umgeklappt

V-P 2

mit Brustdehnung und Beinrotation
1 großes majimo umgeklappt

A-Positionierung

Belüftung der oberen Lungenbereiche und Fersenfreilagerung
2 kleine + 3 mittlere + 2 Druckknopf majimo

T- und I-Positionierung, LiN-Lagerung

mit Spitzfußprophylaxe und Fersenfreilagerung
2 kleine + 1 mittleres + 4 Druckknopf + 1 großes majimo



majimo – Das Dreieck macht den Unterschied!




KINÄSTHETISCH & druckentlastend KRAFT- & zeiteffizient

Die majimo Dreieckskissen wurden nach den Prinzipien der Kinästhetik entwickelt. Dank ihrer intuitiven Anwendung sind Positionswechsel in Sekundenschnelle möglich – das spart Zeit und Kraft und entlastet den Rücken.



HYGIENISCH & rein NACHHALTIG & kosteneffizient

majimo Produkte im Standardsortiment sind kochfest und für Großwäschereien geeignet. Die desinfizierbaren, atmungsaktiven Schutzbezüge reduzieren Waschintervalle, verlängern die Nutzungsdauer und steigern die Langlebigkeit der Kissen.

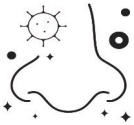

ALLERGIKER-freundlich FAIR produziert & vegan

Wir fertigen unsere Produkte zu 100 % in Deutschland – mit Liebe zum Detail und Verantwortung für Mensch, Tier und Natur. Dabei setzen wir ausschließlich auf hochwertige, kochfeste Materialien, zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100.



SANFT & zart zur Haut WEICH & bauschbeständig

Die majimo Dreieckskissen bieten sanfte und flexible Unterstützung – für jedes Alter, jede Lebenslage und jede körperliche Konstitution. Sie stabilisieren, ohne einzuschränken, und bewahren die individuelle Beweglichkeit.



Positionierung im Sitzen – Anwendbar im Rollstuhl, Stuhl, Sessel oder Couch.

Ellenbogenabstützung
2 Druckknopf+ 1 großes majimo

Entspannung der Schultermuskulatur
1 mittleres oder 1 großes majimo, individuell nach Körpergröße

Haltungskorrektur
1 mittleres + bei Bedarf 1 kleines majimo



Transferhilfe

Stabiler Stand des zu Pflegenden voraussetzend
1 mittleres oder 1 großes majimo



Positionierung in Rückenlage – Oberkörperhochlagerung

Kopfstabilisierung
ohne zu fixieren
1 kleines majimo



Bei Atembeschwerden, Reflux, Sondennahrung
und beim Lesen
1 mittleres unten + 1 großes mittig + 1 kleines majimo oben im Nacken
+ optional 1 großes oder mittleres majimo unter den Knien



Das Druckknopfkissen Ein Multitalent für die Pflege

- Geeignet für die Fersenfreilagerung, Rehabilitation und Dekubitusprophylaxe.
- Durch sensorische Reize ideal zur Vorbeugung und Nachsorge bei neurologischen Veränderungen und daraus resultierenden Spastiken.
- Bei Kachexie als Ellenbogenabstützung einsetzbar – bleibt in Position, ohne einzuschränken.
- Selbst kleinste Zwischenräume werden sanft ausgefüllt
- Sicher und komfortabel in der Anwendung.
- Kochfest und robust – speziell für den täglichen Pflegeeinsatz entwickelt.



MADE IN GERMANY

majimo™
www.majimo.de



Monika Bruchhaus
0234-37980449



Maria Swierkowska
0234-90401131



Zur Webseite
info@majimo.de



5 ★ Google Bewertungen

majimo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Gräfin-Imma-Str. 212 | 44797 Bochum

Firmensitz: 44797 Bochum | Handelsregister Bochum – HRA 7117 | USt-IdNr.: DE815567434
Geschäftsführende Gesellschafterinnen: Monika Bruchhaus, Maria Swierkowska

Persönlich haftende: Gesellschafterin: mellow UG (haftungsbeschränkt)
Firmensitz: 44797 Bochum | Handelsregister Bochum – HRB 15552