

nevisCura 



Ihr Partner für  
innovative Lösungen  
zur Sturzprävention



# Inhalt

## Wieso nevisCura?

- 3 Pflege heute
- 4 Die Köpfe hinter nevisCura

## Produkte

- 6 nevisCura Bettsensor
- 12 Alarm-Anbindung
- 16 nevisCura App
- 18 nevisCura Portal
- 21 Auszeichnungen
- 22 Refinanzierung



Den Spagat zwischen einer leistungsstarken, sicheren Pflege und einer wirtschaftlichen Organisation zu schaffen, ist für viele Pflegeeinrichtungen eine herausfordernde Aufgabe. Auf der einen Seite steht eine immer größer werdende Nachfrage mit einem stark steigenden Pflegeaufwand. Auf der anderen Seite stehen Personalmangel, hohe Krankheitsraten und sich verändernde Rahmenbedingungen. Es wird in Zukunft daher umso wichtiger sein, dass sich Pflegekräfte auf den Kern ihrer Pflegearbeit konzentrieren können.

Hier setzt nevisCura an. Die nevisCura-Produkte stehen für zuverlässige und intelligente Unterstützung, bei gleichzeitig geringem Aufwand in der Nutzung. Eine intuitive Handhabung ist ebenso wichtig wie ein modernes und doch unauffälliges Design. nevisCura-Produkte sind innovativ und offen gegenüber der Anbindung zu Drittsystemen. Um das zu erreichen, arbeiten wir eng mit Personen aus der Pflegebranche zusammen. Kunden und Nutzer von nevisCura-Produkten können die weitere Entwicklung durch Ihre Rückmeldungen aktiv mitgestalten.

Kunden-Zitat: „Wir arbeiten bereits von Beginn an mit nevisQ zusammen. Hier sind wir nicht nur Kunde, sondern auch Partner. Denn das Team reagiert sofort auf unsere Wünsche und Anforderungen und berücksichtigt sie bei der Entwicklung.“





# nevisCura

nevisCura ist ein Paradebeispiel dafür, wie aus einer Idee im Studium etwas Großes entstehen kann. Als sich die Gründer der Firma kennenlernten, hatte bereits jeder von ihnen im privaten Umfeld seine ganz eigene Erfahrung mit der Pflegesituation in Deutschland gemacht. Mit der Vision, dass innovative Technologie eine ganze Branche revolutionieren und gleichzeitig Gutes tun kann, gründeten die vier Freunde nevisQ. Dabei wurde das Team von Anfang an von öffentlicher Hand gefördert, sei es durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, die Europäische Kommission oder die NRW.Bank. Nach vielen Jahren Produktentwicklung ist nevisCura heutzutage eine bekannte Größe in der Branche. Tausende nevisCura-Produkte werden mittlerweile in Deutschland, Spanien, Österreich und der Schweiz genutzt.



40% weniger Stürze  
5.000€ jährlich sparen  
2.000 Stunden mehr Zeit

Der nevisCura Bettsensor ermöglicht einen intelligenten Bettausstieg-Alarm, der Pflegekräften den Arbeitsalltag spürbar erleichtert. Einmal und mit nur wenigen Handgriffen am Bett angebracht, meldet der stille Wächter diskret, wenn ein Bewohner das Bett verlassen möchte – und das schon bevor er auch nur einen Fuß auf den Boden gesetzt hat. Und das Beste: Der Sensor ist kompatibel zu jeder gängigen Rufanlage und anderen Alarm-Einheiten.

Kostenlose  
Testphase



# Was macht den nevisCura Bettsensor so besonders?

*Vom Expertenstandard Sturz, Medizinischem Dienst und Heimaufsicht empfohlen*



## **STURZVERMEIDUNG**

Dank der frühzeitigen Erkennung eines Bettausstiegs, können Pflegekräfte dem Bewohner bereits beim Aufstehen zur Hilfe kommen. Dadurch wird das Sturzrisiko statistisch gesehen um durchschnittlich 40% reduziert.



## **UNTERSCHIEDUNG VON BETTAUSTIEG & BETTDECKE**

Die intelligente Multisensor-Technologie kann zwischen einem Bettausstieg und bspw. einem Herunterfallen der Bettdecke unterscheiden. Nur bei einem Bettausstieg wird ein Alarm versendet.



## **KOMFORTABEL**

Der Bettsensor kann mit wenigen Handgriffen installiert und auch wieder abmontiert werden. Zudem kann der Bettsensor zum Beispiel während der Reinigung kurzzeitig deaktiviert oder ganz ausgeschaltet werden, wenn er nicht benötigt wird.



## **DEMENZFREUNDLICH**

Das dezente Design macht den Bettsensor beinahe unsichtbar. Das ist nicht nur richtig schick, sondern auch sinnvoll. So kommen Bewohner nicht in Versuchung, den Sensor zu umgehen.



## **INVESTITIONSSCHUTZ**

Der Bettsensor ist langlebig und zukunftsfähig. Die Hardware ist so dimensioniert, dass sie über Jahre eingesetzt und auch nachträglich mit Updates bespielt werden kann. Verschiedene Schnittstellen ermöglichen die Anbindung an Pflegesoftware.



## **EINFACH PFLEGELEICHT**

Das unempfindliche Material des Gehäuses ist pflegeleicht und lässt sich einfach reinigen. Dabei muss das Gerät weder abgenommen noch hin und her geschoben werden.

# Farbvarianten



## NATURBUCHHE

Lässt den Bettsensor mit hellbraunen Betten fast verschmelzen.



## LICHTGRAU

Passt perfekt zu weißen oder grauen Betten, wie zum Beispiel Krankenhaus-Betten.



## KIRSCHHOLZ

Der richtige Farbton für Betten aus dunklem Holz.



## Halterung: sicher & flexibel

Mit den beiliegenden Halterungen wird die Befestigung des Sensors am Bett zum Kinderspiel. Nachdem die passenden Halterung auf den Bettsensor geklickt wurden, kann das Gerät einfach am Bett eingehangen werden. Diese Art der Befestigung ist sicher und flexibel zugleich. Im Übrigen: Auf diese Weise können Sie das Gerät in der optimalen Höhe anbringen.



# Inbetriebnahme



Haken befestigen

1

Auspacken



2



Mit Strom verbinden

3

Einhängen

4



5

Alarm koppeln

## nevisCura Bettsensor im Malteserstift St. Josef



### Einrichtung:

- 135 Pflegeplätze
- Alarm-Anbindung an Zettler Medical 800-Rufanlage

### Resultat:

- Sturzrate reduziert um bis zu 30 %
- Laufwege um bis zu 40 % reduziert, besonders in der Nacht
- Reaktionszeit auf kritische Situationen deutlich verbessert
- Mehr Zeit für aktivierende Pflege, da weniger Kontrollgänge nötig

### Warum soll der Bettsensor eingesetzt werden?

Allgemein soll die Sturzprävention verbessert werden. Es soll früher erkannt werden, wenn Bewohner ihr Bett verlassen oder sich unruhig verhalten, vor allem nachts oder bei dementen Personen. Dadurch erhofft man sich eine Reduzierung der Stürze, schnellere Reaktionszeiten, mehr Sicherheit für Bewohner und effizientere Arbeitsabläufe für das Pflegepersonal.

### Wie unterstützt der Bettsensor im Arbeitsalltag?

Im Alltag unterstützt der Sensor durch eine automatische Benachrichtigung beim Verlassen des Betts. Dadurch werden unnötige Kontrollgänge vermieden, und es kann gezielter reagiert werden. Vor allem die Nachtwache wird dadurch entlastet.

### Vorteile

- weniger Stress und gezielterer Einsatz des Personals
- Bewohner fühlen sich sicherer, da Hilfe schneller kommt
- Anzahl der nächtlichen Kontrollgänge konnte deutlich reduziert werden

**Elena Felicioni**  
Pflagedienstleitung

## Warum soll der Bettsensor eingesetzt werden?

Die Eigenständigkeit und das selbstbestimmte Agieren der Bewohner soll erhalten bleiben. Trotzdem soll die Begleitung durch den Nachtdienst, wenn nötig beim Toiletten-gang in der Nacht, gewährleistet sein. Durch das Wegfallen der Sichtkontrollen kann der Bewohner längere Intervalle durchschlafen.

## Wie unterstützt der Bettsensor im Arbeitsalltag?

Durch die Signale des nevisCura Bettsensors auf die Rufanlage kann man den Bewohner gezielt und zeitgenau dann unterstützen, wenn er Hilfe benötigt. Hierbei verleiht der Bettsensor den Nachtdienst-Mitarbeitern die Sicherheit, dass Stürze verhindert werden.

## Vergleichstabelle Bettsensor vs. Trittmatte

	NEVISCURA BETTSENSOR	TRITTMATTE
Einfach zu verstehen / installieren	✓	✓
Kann NICHT von Bewohnern umgangen werden	✓	✗
Alarm bei	Aktivität vor dem Sensor	Kontakt mit der Matte
Hohe Genauigkeit	✓	✗
Unauffällig für den Bewohner	✓	✗
Individuelle Einstellung möglich	✓	✗
An- und Ausschalter	✓	✗
Pflegeleicht / einfach zu handhaben	✓	✗
Preis	399 € zzgl. Alarm-Anbindung	Bis zu 800 €

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gerne:

E-Mail: [beratung@neviscura.de](mailto:beratung@neviscura.de)

Tel.: +49 241 927884010

# Anbindung an die Alarm-Einheiten

Der nevisCura Bettsensor soll flexibel einsetzbar sein, deshalb kann er mit vielen verschiedenen Alarm-Einheiten verbunden werden. Durch unsere jahrelange Erfahrung mit über 100 verschiedenen Alarm-Varianten finden wir auch für das seltenste und älteste Modell eine Lösung.



## RUFANLAGE

Für Pflegeeinrichtungen mit Rufanlage ist eine Anbindung der Sensorik in der Regel problemlos möglich. Die Anbindung wird von uns individuell für die jeweilige Anlage konfiguriert.



## FUNKGONG

Für Einrichtungen, in denen keine zentrale Rufanlage oder Telefonanlage verbaut ist, ist der Funkgong eine gute Option. Dieser wird einfach in die Steckdose gesteckt und gibt ein akustisches Signal aus.



## HAUSNOTRUF

In häuslichen Einrichtungen und im Betreuten Wohnen wird häufig ein Hausnotruf zur Alarmierung genutzt. Auch hier bieten wir Ihnen eine passgenaue Anbindung.



## APP-ANBINDUNG

Dank der Integration in unsere App oder eine App von Drittanbietern kann der Bettausstieg-Alarm auch über jedes gängige Smartphone angezeigt werden.



## PAGER

Kommen in der Einrichtung Pager zum Einsatz, kann der Bettsensor auch darüber angebunden und ein Alarm ausgegeben werden. Auch hier wird die Konfiguration passgenau auf die Gegebenheiten konfiguriert.

# Alarm-Anbindung - Wir machen es Ihnen einfach

Egal, ob nagelneu oder 30 Jahre alt: nevisCura-Produkte lassen sich an jedes Alarm-System anbinden. Wir haben bereits Erfahrungen mit über 100 verschiedenen Varianten gemacht. Die Erkenntnisse daraus haben wir genutzt, um Ihnen die Anbindung an Ihr Alarm-System so einfach wie möglich zu machen.



## NEVISCURA FUNK-EMPFÄNGER

Der nevisCura Funk-Empfänger kann **bei den meisten Rufanlagen eingesetzt** werden. Die **Inbetriebnahme ist denkbar leicht**: Funk-Empfänger in Wand-Einheit einstecken, Funk-Empfänger und Bettsensor koppeln, fertig.

Je nach Modell kann man bei einem nevisCura Funk-Empfänger **zwischen verschiedenen Varianten umschalten**, z.B. zwischen Ruhestrom und Arbeitsstrom oder bzgl. der Stromversorgung.

Zudem **überwacht** der Funk-Empfänger die **Verbindung** zum Bettsensor kontinuierlich. Ist der Bettsensor für ca. 30 Sekunden nicht erreichbar, wird das über die Rufanlage gemeldet.

## NEVISCURA ADAPTERBOX

Wenn der nevisCura Funk-Empfänger nicht einsetzbar ist, kommt stattdessen die nevisCura Adapterbox zum Einsatz. Das ist bei **manchen Rufanlagen und auch bei Hausnotrufsystemen** der Fall. In der Adapterbox ist dann der jeweilige Funk-Sender oder das jeweilige Anschlusskabel verbaut. Die Adapterbox muss dann nur zwischen Bettsensor und Steckdose gesteckt werden und mit dem jeweiligen Alarm-System gekoppelt werden.

Die nevisCura Adapterbox ist **äußerst robust** und hält auch größere Stöße problemlos aus.



*Jetzt in 3 Minuten die passende  
Alarm-Anbindung vorbereiten*



# Referenzen Rufanlagen und Hausnotruf

zPCS, Ackermann, AN Systems, Ascom, ASS, Aastra, Avaya, bellphone,  
Cereda-Systems (Famalux, Varolux und Winkel), ConDigi, CSS, DeTeWe,  
EFE, ELDAT, FACI, GEMTEC, GETS, Gira, GutGesell, Heiland, Honeywell,  
Hospicall, Ilper, Impex, Indigo Care, Johnson Controls, Legrand, Mitel,  
Multitone, PANA-MED, Pragma, SchneiderElectric, Schrack, Siemens,  
SmartLiberty, Telealarm, Televic, Temeno, Tenovis, tetronik, Tiptel,  
Tunstall, Tyco, VarioRec, Vitakt, WICON, Zettler uvm.

*Zertifizierte Partner von:*



# Kundenstimmen

„Die Pflegekräfte sind von dem Bettsensor begeistert. Selbst wenn sich ein Bewohner auf die Bettkante setzt, werden die Pfleger zuverlässig alarmiert und können dem Bewohner helfen.“

„Es ist wirklich toll, dass sich Menschen in der Pflegebranche so engagieren und neue Dinge entwickeln.“

„Wir arbeiten bereits von Beginn an mit nevisQ zusammen. Hier sind wir nicht nur Kunde, sondern auch Partner. Denn das Team reagiert sofort auf unsere Wünsche und Anforderungen und berücksichtigt sie bei der Entwicklung.“

„Seit Einbau der Sturzsensorik hat sich die Anzahl unserer Stürze verringert. Deshalb ist nevisCura für uns die beste Lösung für Pflegeeinrichtungen.“

„Wir sind begeistert, was so ein unscheinbarer Sensor leisten kann. Wie aus bekannter Technologie etwas Neues und Innovatives geschaffen wird, ist das auf was die Pflegebranche wartet.“

„Eine schnelle Installation und eine leichte Wartung runden die Lösung ab.“

„Ich bin Fan des Bettsensors! Der Umgang ist einfacher als bei Trittmatten, die auch oft kaputt gehen. Jeder Mitarbeiter bewertet den Bettsensor besser als die Trittmatte.“

„Jedes Mal wenn gewisse Bewohner aufstehen und jemand kommt rechtzeitig dorthin, hat man schon einen Sturz verhindert.“

# nevisCura App: Updates und Einstellungen direkt auf dem Smartphone



Mit der nevisCura App lassen sich nevisCura-Geräte ganz leicht steuern und aktualisieren. Und das Beste: die Verbindung zwischen Smartphone und nevisCura-Gerät geschieht über eine direkte Funk-Verbindung, ganz ohne Internet. So lassen sich nevisCura-Geräte überall aktualisieren oder konfigurieren.


# Alle Funktionen im Überblick

## MÖGLICHKEITEN MIT DER APP

- ✔ Sensibilität des Betausstiegalarms festlegen
- ✔ Pause-Funktion aktivieren oder deaktivieren und Pause-Dauer einstellen
- ✔ Die aktuellste Firmware installieren, um dadurch neue Funktionen zu erhalten
- ✔ Einfache Verbindung mit Bettsensor und Funk-Empfänger, keine Internetverbindung nötig
- ✔ Einfache und intuitive Bedienoberfläche, Updates mit nur wenigen Klicks möglich



# nevisCura Portal: Steuerungszentrale für eine einfache Verwaltung (In Entwicklung)

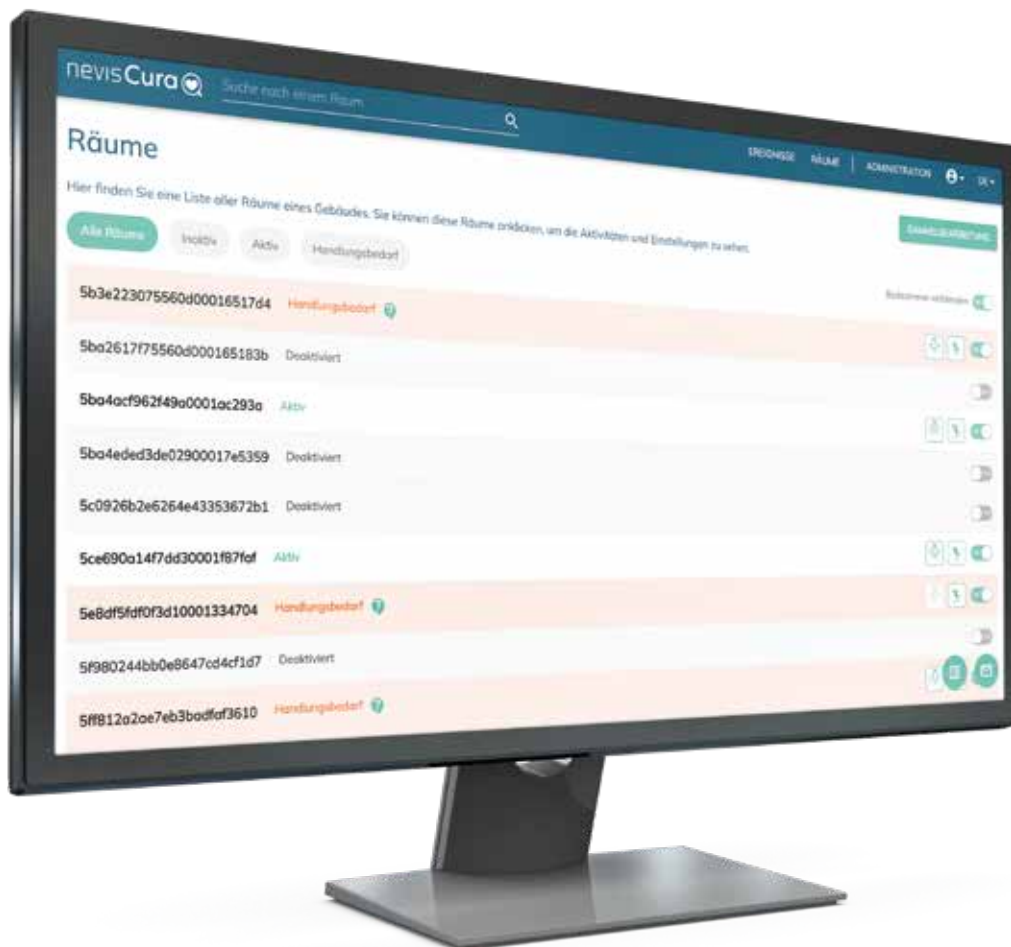

Das nevisCura Portal wird die Steuerungszentrale Ihrer Geräte. Über die intuitive Benutzeroberfläche können über jeden beliebigen Computer mit Internet- oder Netzwerkzugang Einstellungen vorgenommen oder Informationen abgerufen werden. Die nevisCura App wird als vereinfachte Version des nevisCura Portals Software-Updates und technische Wartung vor Ort ermöglichen.

# Alle Funktionen im Überblick

## **AKTIVITÄTEN & AUFENTHALTSPROFILE GANZ OHNE KAMERAS**

- ✓ Überblick über alle Ereignisse, wie Stürze, Bettausstiege und Bewegungen
- ✓ Analysen über Routinen sowie Nachtaktivitäten
- ✓ Informationen vor und nach einem Sturz oder dem Verhalten nach einem Krankenhaus aufenthalt
- ✓ Langzeitanalyse zum Verhalten oder Veränderungen von Bewohnern

## **STEUERUNG UND ÜBERWACHUNG**

- ✓ Steuerungszentrale für alle angebundenen Geräte: Funktionen aktivieren / deaktivieren, Nachtlcht konfigurieren oder Updates einspielen
- ✓ Informationen zu technischen Problemen
- ✓ Software-Updates durchführen

## **GEZIELTE WEITERGABE VON DATEN**

- ✓ Direkte Einträge in der Pflegedokumentation
- ✓ Teilen der Daten mit behandelnden Ärzten
- ✓ Bereitstellung der Daten für Angehörige

# Verschiedene Hosting-Möglichkeiten

Wir bieten das Portal in zwei Varianten an: Entweder als sichere Cloud-Variante oder auf einem lokalen Server bei Ihnen im Haus.

## nevisCura Bettsensor bei AURA Andalucía, Spanien



### Einrichtungen:

- Test in 2 Einrichtungen
- 99 Bewohner im Test, 49 mit Sensoren, 50 ohne Sensoren
- Anbindung an AURA App

### Resultat:

- 50 % weniger Frakturen und Druckgeschwüre, physischer und psychischer Zwischenfälle
- 25 % weniger Krankenhaus-Einweisungen
- CECAVIR Bewertung:
  - 69 % verbessert für Gesundheit,
  - 61 % verbessert für funktionale Fähigkeiten
  - 37 % besser für Lebenszufriedenheit



*“Der nevisCura Bettsensor reduziert die Sorgen der Pflegekräfte, vor allem bei Bewohnern mit Demenz. Der Sensor funktioniert sehr gut und ist sehr hilfreich”*

**José Ángel Aranda López**

Direktor AURA Cuidados

### Warum soll der Bettsensor eingesetzt werden?

Der Bettsensor soll genutzt werden damit Pflegekräfte rechtzeitig Bescheid wissen, wenn eine sturzgefährdete oder orientierungslose Person aufstehen möchte. Die beiden Einrichtungen sind weitläufig, sodass die Pflegekräfte lange Wege gehen müssten, um alle Bewohner im Blick zu haben.

### Wie unterstützt der Bettsensor im Arbeitsalltag?

Der Bettsensor meldet umgehend, wenn eine Person ihr Bett verlassen möchte. Die Meldung erscheint sofort über die App auf dem Smartphone der Pflegekräfte. Über die App und am Computer kann zudem die Historie von Bettausstiegen eingesehen werden.

### Vorteile

- Einfach und intuitiv zu installieren, sehr gute Anleitungen
- Mehr emotionale Sicherheit für Pflegekräfte und Bewohner
- Effizientere Pflegearbeit für alle Pflegekräfte

# Auszeichnungen & Förderungen



 EIT Health is supported by the EIT  
a body of the European Union



Maas – Rhein (NL - BE - DE)

STIPP



# Förderprogramme und andere Finanzierungsmöglichkeiten



## **SOFORTPROGRAMM PFLEGE**

Mit einem „Sofortprogramm Pflege“ will die Bundesregierung den Alltag der Pflegekräfte spürbar entlasten. Gleichzeitig soll die pflegerische Qualität durch technische Innovationen und Hilfsmittel gesteigert werden.

Gefördert werden Investitionen in Digitalisierung, die erhebliches Potenzial zur Entlastung der Pflegekräfte bieten. Also auch die Lösungen von nevisCura.

Bis zu 40 % der Gesamtinvestition bzw. maximal 12.000 € können gefördert werden. Der Antrag für die Förderung kann entweder anhand eines Kostenvoranschlags gestellt werden oder nachträglich mit der entsprechenden Rechnung.

Förderfähig sind alle nach § 72 SGBXI zugelassenen ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen.

## **STAATLICHE FÖRDERPROGRAMME**

Dass die Digitalisierung auch für die Pflege viele Vorteile bringt, liegt auf der Hand. Deshalb haben Bund und Länder zahlreiche Förderprogramme entwickelt, die die Pflegebranche bei der Digitalisierung der Einrichtungen finanziell unterstützen. Aber es gibt auch Förderprogramme, die nicht speziell für den Pflegesektor entwickelt wurden und dennoch in Anspruch genommen werden können. Das Programm „Digital jetzt“ unterstützt beispielsweise den Mittelstand, dazu zählen die meisten Pflegeeinrichtungen, mit 40-50% bei Investitionen in digitale Produkte. Außerdem gibt es verschiedene Initiativen in den Ländern Bayern, Brandenburg und Niedersachsen, die Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität fördern.

## **SOZIALE ORGANISATIONEN**

Einige soziale Organisationen, die sich zum Beispiel über die Rentenlotterie finanzieren, fördern Projekte, die Menschen direkt helfen oder die Lebensqualität verbessern. Dazu zählt auch die Ausstattung von Pflegeeinrichtungen mit digitalen Sturzmeldesystemen, die die Pflegequalität erhöhen und gleichzeitig das Pflegepersonal entlasten.

Die bekanntesten Initiativen sind Aktion Mensch, Glücksspirale oder die Fernsehlotterie. Sie fördern jeden Monat bis zu 1.000 freie, gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen in ganz Deutschland. Um Fördergelder zu erhalten, muss ein Förderantrag gestellt werden. Dieser wird nach Einreichung durch verschiedene Gremien geprüft und bewilligt. Einige unserer Kunden haben unsere Lösungen in ihrer Einrichtung bereits darüber finanzieren können.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schreiben Sie uns unter:

[beratung@neviscura.de](mailto:beratung@neviscura.de)

Telefon: +49 241 927 88 40 10

nevisCura 

Eine Marke der nevisQ GmbH

nevisQ GmbH  
Dennewartstraße 25-27  
52068 Aachen

Stand: 27.03.2026  
[www.neviscura.de](http://www.neviscura.de)