

## gutBlueBUS Rufsystem das Beste aus Funk und Draht

Alle Rufsystemkomponenten mit gutBlueBUS verfügen über einen verdrahteten BUS-Anschluss und eine gutBlue-Funkschnittstelle in der selben Baugruppe.

Die BUS-Schnittstelle (auf Basis CANBus)

bietet sicherste Kommunikation in bestehenden Leitungsnetzen.

gutBlue Funk (auf Basis Bluetooth) erweitert diese positiven Eigenschaften um die Kernmerkmale Flexibilität, Mobilität und Lokalisierung.

### Sicherheit nach DIN0834



gutBlueBUS bietet Ausstattung und Sicherheit nach DIN. Alle gutBlueBUS Module bieten schnelle Prüfintervalle nach **DIN0834**. Dies gilt für die BUS- und Funk-Komponenten!



### Rufanlage überall

Durch das kombinierte Rufsystem erhalten Sie eine Rufanlage die **flächendeckend** funktioniert. In den Räumlichkeiten stehen die verdrahteten Komponenten

zur Verfügung. In den Gängen, Fluren, Gartenbereichen oder auf der Terrasse wird gefunkt.

### Ortung - auch ohne Ruf

Alle gutBlue-Funktaster sind auch ohne aktiven Ruf auffindbar. Verlegte Funktaster gehören der Vergangenheit an. Personal oder Hilfsbedürftige\* werden **schneller gefunden**, dies bietet zusätzliche Sicherheit.



## gutBlueBUS Rufsystem das Beste aus Funk und Draht

### servicefreundlich

gutBlueBUS bietet Ruftaster mit haltbaren **Magnetstecker**, inklusive Störmeldung bei unabsichtlichem Herausziehen. Und bei Reparatur hilft unsere 15 Jahre Liefergarantie!



### Standort bei Rufauslösung



Bei einer Rufauslösung per Funk wird automatisch der zimmergenaue **Standort** mit angezeigt. Dies gewährleistet schnellstmögliche Hilfe. Egal von wo der Ruf kommt: Rufart, Person und Standort werden stets dargestellt.

### Hin-Weg-Lauf Signalisierung

Mit dem Softwaremodul gutSoft-**AreaControl** werden Bereiche definiert, in denen automatisch ein Hin-Weg-Lauf-Ruf ausgelöst wird. Offene, barrierefreie Pflegeeinrichtungen und Sicherheit für desorientierte Bewohner sind nun gleichzeitig möglich.



**Investitions-Schutz** durch modernste Technik. gutBlueBUS basiert auf bewährter **CANBus**- und **Bluetooth**-Technologie. gutBlue erzeugt so großes Interesse, dass es durch Niedersachsen und EU im Rahmen der Innovationsförderung gepusht wird.

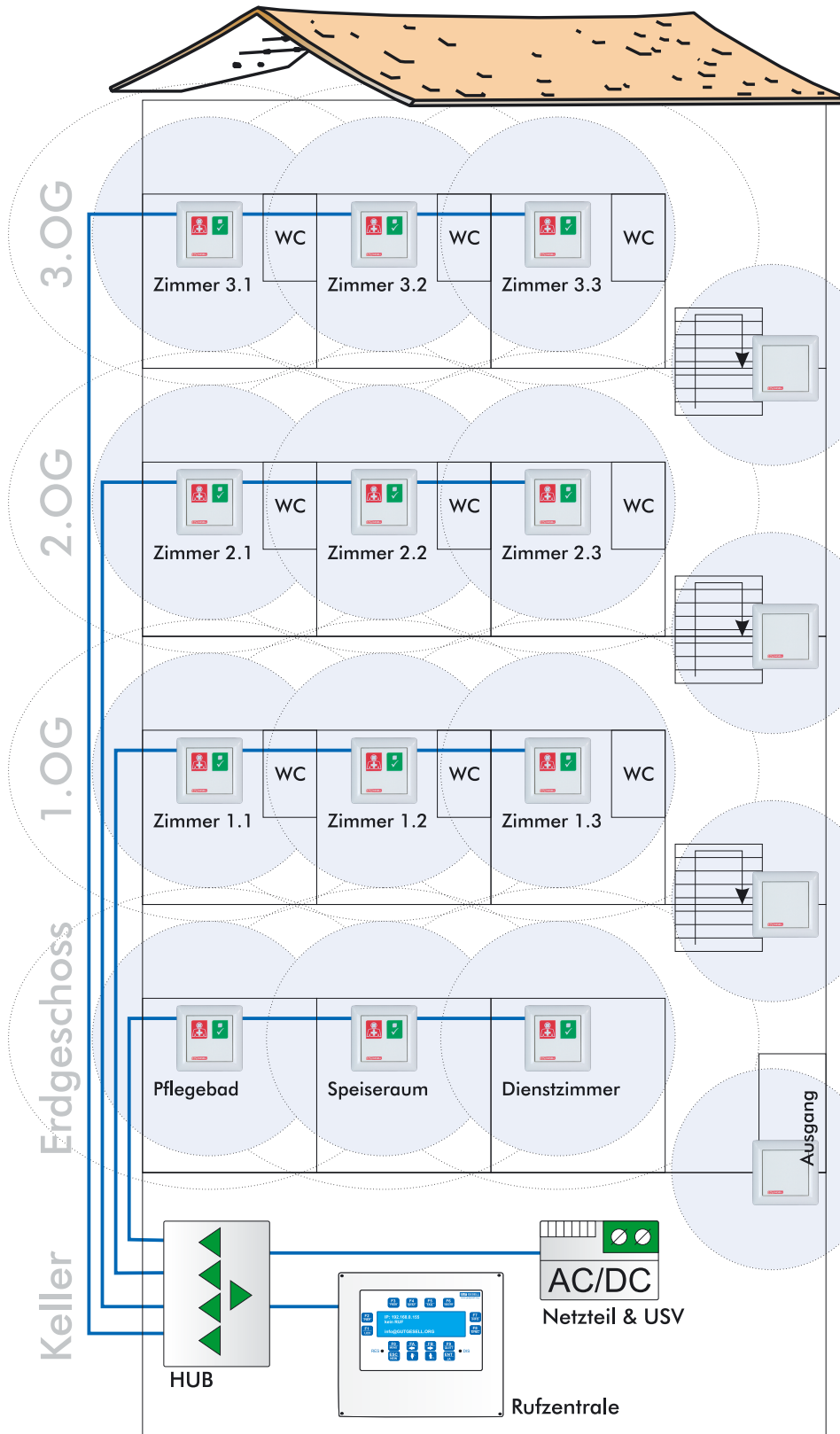


\*)sofern rechtliche Freigabe vorhanden

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Logos, Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

# gutBlueBUS Rufsystem

## das Beste aus Funk und Draht

[www.gutgesell.com](http://www.gutgesell.com)


### Beispiel 1:

Der Bewohner in Zimmer 3.2 löst auch in Zimmer 3.2 mit seinem Bett-Taster oder mobilen gutBlue-Taster einen Ruf aus.

Zur Anzeige kommt:  
RUF 3.2

### Beispiel 2:

Der Bewohner aus Zimmer 3.2 geht in den Speiseraum und löst mit seinem mobilen gutBlue-Taster einen Ruf aus.

Zur Anzeige kommt:  
RUF 3.2 (aus Speiseraum)

### Beispiel 3:

Der desorientierte Bewohner aus Zimmer 1.1 verlässt die Station und will in den Speiseraum. Er hat einen gutBlue-Taster mit AreaControl am Arm. Der Bereichsender beim Treppenhaus mit gutBlue-AreaControl löst einen Voralarm aus, zur Anzeige kommt:

BEREICH 1.1 (Treppe EG/1.OG)

### Beispiel 4:

Der desorientierte Bewohner aus Zimmer 1.1 will durch den Ausgang das Haus verlassen. Er hat einen gutBlue-Taster mit AreaControl am Arm.

Der Bereichsender beim Ausgang mit gutBlue-AreaControl löst einen Alarm aus, zur Anzeige kommt:

WEGLAUF 1.1 (AUSGANG)



gutBlue  
AreaControl  
Bereichsender



gutBlueBUS  
Ruf-Abstell-Taster  
für Zimmer



gutBlue  
Funkzelle  
Nahbereich



gutBlue  
Funkzelle  
Gesamtbereich